



SNC Slide K7

Laveur par Ultrasons

**Nettoyage - Désinfection - Rinçage - Séchage
pour instrumentation classique et cassettes de chirurgie**



SNC Slide K7- Version Tiroir sous plan de travail

Ouverture / Fermeture électrique du Tiroir

GAMASONIC - 63160 BILLOM - France -


Tél : (+33) 04 73 68 90 26 - Fax : (+33) 04 73 68 97 43 - Site internet : www.gamasonic.eu



Panier P12

(Pour instrumentation de type "VRAC")

Capacité ~ 15 patients

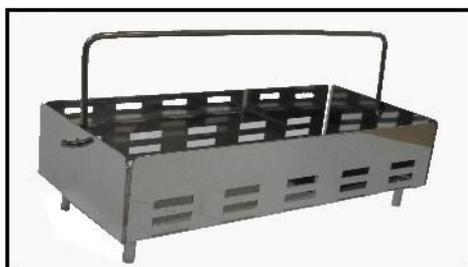

Panier P3

(Pour instrumentation de type "VRAC")



Panier PC17

(Pour les Cassettes de Chirurgie)

Capacité :

24 Cassettes 4 instruments
12 Cassettes 10 instruments
8 Cassettes 20 instruments

FONCTIONNEMENT

OUVERTURE / FERMETURE DU TIROIR

L'ouverture / Fermeture du tiroir sur le SNC Slide K7 s'effectue de manière automatisée via une impulsion sur l'interrupteur « Ouverture/ Fermeture ».

PRÉ-DÉSINFECTION « PANIER / CASSETTES »

- ▶ Positionner le panier adapté à l'instrumentation dans l'appareil
 - Panier P12 ou 2 Paniers P3 (instrumentation vrac)
 - Panier PC17 (cassettes de chirurgie)
- ▶ Lancer le cycle de Pré-Désinfection Panier / Cassettes
 - Pré-Désinfection Panier = 9 cm (Hauteur d'eau)
 - Pré-Désinfection Cassettes = 20 cm (Hauteur d'eau)
- ▶ Positionner l'instrumentation souillée dans le panier positionné en effectuant des phases d'Ouverture / Fermeture du tiroir.

N.B. : Une fois le panier plein, lancer le Cycle Automatique Panier ou Cassettes

CYCLE AUTOMATIQUE « PANIER / CASSETTES »

- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Nettoyage sous Ultrasons avec le produit DETERBAKT®
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons avec le produit DPH 21
- ▶ Séchage par air chaud

INSTALLATION DE L'APPAREIL (voir documentation technique)

L'appareil SNC Slide s'installe sous un plan de travail dans un module de meuble de 60 cm de largeur.

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V avec terre, une vidange type « machine à laver », une arrivée d'eau du réseau bactériologiquement contrôlée et filtrée raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27).

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés sur le côté droit de l'appareil. Le niveau bas des bidons est visualisé sur le tableau de commande.

L'appareil SNC Slide K7 ne se substitue pas à la stérilisation des instruments après leur nettoyage.

**EN FIN DE MISE EN SERVICE,
LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ
(cuve rincée et essuyée)**