

proPad Lingettes imprégnées pour la désinfection rapide des surfaces sensibles à l'alcool, tout particulièrement pour les selleries des fauteuils de traitement



Domaine d'utilisation selon la directive sur les dispositifs médicaux

Lingettes imprégnées pour la désinfection et le nettoyage des surfaces en milieu médical, sensibles à l'alcool comme par ex. les cuirs naturels et synthétiques des fauteuils de traitement.

Domaine d'utilisation selon le règlement sur les biocides

Lingettes imprégnées pour le nettoyage et la désinfection des surfaces sensibles à l'alcool. Tissu non tissé, particulièrement doux, non pelucheux et résistant, 100 % fibres synthétiques. Forte imprégnation de la solution désinfectante. Épaisseur : 50 g/m². Taille, grand format : 28 x 30 cm. Sans alcool et parfum.

Utilisation

Pour la désinfection, utiliser les lingettes en frottant entièrement les surfaces et les objets. Respecter le temps de pose puis, le cas échéant, sécher avec un tissu propre.

DentaProtect Entretien et protection des selleries en vinyle



Propriétés

DentaProtect est un produit d'entretien et de protection pour les selleries dont le similicuir est très endommagé. Ce produit est un microfilm qui, tel un film, scelle la surface de la sellerie et protège contre les usures par abrasion, les salissures et les décolorations provenant des vêtements.

Utilisation

A la fin d'une journée de travail, suite au nettoyage en profondeur de la sellerie avec une éponge douce ou une brosse souple, utilisez les lingettes pour appliquer le film de protection. Seules 1 à 2 lingettes suffiront à traiter l'ensemble de la sellerie de votre fauteuil. Veillez à refermer la boîte contenant les lingettes de suite après leur utilisation.

DentaClean Nettoyant pour le skaï, le cuir lisse et les surfaces synthétiques



Propriétés

DentaClean nettoie facilement et en douceur le skaï et les surfaces lisses même particulièrement sales.

Utilisation

Procéder à un essai préalable sur une partie cachée. Nous recommandons le nettoyage quotidien de la sellerie, c'est-à-dire à la fin de chaque journée de soins, et particulièrement dans le cas de couleurs claires. Toute saleté visible doit être nettoyée de suite. Appliquer DentaClean à l'aide de l'éponge légèrement humide puis nettoyer en mouvements circulaires. Passer ensuite un chiffon lisse et en mesure d'absorber la saleté et l'humidité dégagées par le produit. Nous recommandons de nettoyer les selleries en profondeur deux fois par semaine en utilisant alors la brosse au lieu de l'éponge. Après le nettoyage, utiliser DentaProtect qui scellera la surface en déposant un film de protection. Les selleries régulièrement soumises au traitement adéquat avec DentaProtect sont ensuite plus faciles à nettoyer !

PowerClean Nettoyant extra-puissant pour le skaï et les surfaces synthétiques



Propriétés

PowerClean nettoie en profondeur les skaïs très souillés dont la saleté n'a pas pu être enlevée avec le nettoyant DentaClean. Les salissures qui ne peuvent pas être nettoyées avec PowerClean ne pourront pas être éliminées sans que le skaï ne s'abîme. Il est improbable que les colorations imputables aux pigments non fixés des tissus puissent être enlevées.

Utilisation

Faire un essai préalable sur une partie cachée ou un échantillon. Appliquer PowerClean sur les salissures à l'aide d'un chiffon lisse, laisser agir un petit moment puis essuyer avec un chiffon sec. Renouveler si nécessaire. PowerClean ne remplace pas le nettoyant quotidien DentaClean et doit être utilisé uniquement en cas de salissures importantes et récurrentes. Essuyer le produit restant.

Le plus tôt sera le mieux ...



Pour le traitement adéquat des salissures et décolorations de tissus sur les selleries nous proposons une large gamme de produits.
En règle générale : Le plus tôt possible une salissure ou une décoloration sera traitée et d'autant plus grande sera la chance d'en venir à bout.

DKL. UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS D'ENTRETIEN



DKL GmbH
An der Ziegelei 4 · D-37124 Rosdorf
Fon +49 (0)551-50 06 0
Fax +49 (0)551-50 06 299
www.neuepolster.de · info@dkl.de