



Argenteuil en Avril 2020

## Communiqué COVID-19

### Conseils d'entretien des thermo-laveurs et des autoclaves MELAG durant un arrêt d'activité prolongé

Afin d'éviter les problèmes liés à une longue période d'inactivité, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

#### Thermo-Laveur :

- Concernant les thermo-laveurs MELAtherm MT10 DTA & DTB, nous vous conseillons de plonger les lances de succion des produits de traitement dans un récipient rempli d'eau et de lancer un programme de purge. Une fois terminé, sortez les lances de succion et rebouchez les bidons. Cette action permettra de purger le circuit d'alimentation des produits de traitement et d'éviter le dessèchement et la cristallisation des produits dans les tuyaux du circuit.

#### Autoclaves :

- Concernant les autoclaves Premium/Premium+ et ProClass, une longue période d'inactivité peut être à l'origine de blocages des pompes à anneaux d'eau (pompe à vide). Nous vous conseillons de procéder si possible à un test de vide une fois par semaine afin d'éviter la formation de dépôts de calcaire et un blocage de la pompe à vide.

#### Pour tous les appareils :

- **Au moment de quitter vos locaux, n'oubliez pas de fermer les robinets d'arrivée d'eau afin de prévenir toute fuite éventuelle.**

Notre équipe se tient à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.