

## **Elimination du récipient d'amalgame**

Pour les modèles CA 4 / CA 2 / CAS 1 et VSA 300 Dürr Dental, les cassettes d'amalgame sont livrées avec un QR-code sur le couvercle et le conteneur. En scannant ce QR-code, vous serez dirigé vers la page d'élimination du récipient d'amalgame.

Les pas sont les suivants :




1 - Retirer le récipient plein



2 - Remplir d'Orotol dans le récipient plein



3 - Remettre le récipient plein à la société d'élimination

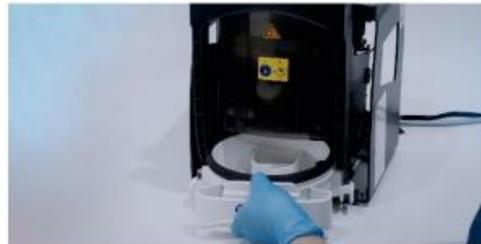

4 - Insérer une nouvelle cassette